


Инструкция по сборке кушетки медицинской смотровой

1. Совместить раму и стойки, как показано на рисунке.
2. Согнуть зажимы по перфорации до совпадения отверстий.
3. Закрепить стойки на раме с помощью болтов М6х16 и гаек М6.

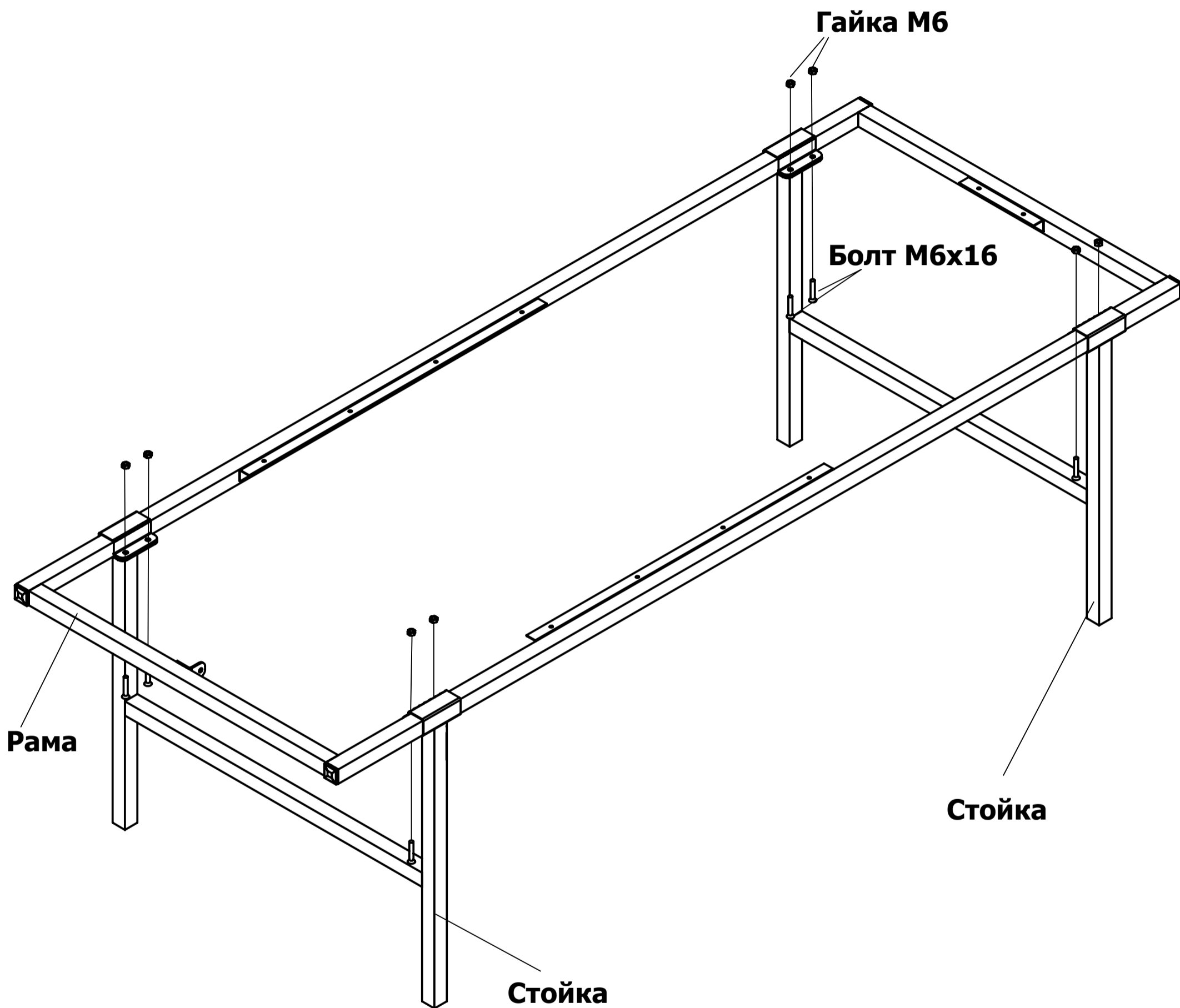

- 4. Установите механизм регулировки угла наклона подголовника "Ростомат".
Для его установки используйте болты М6х16, дистанционные шайбы (2шт.)
и гайки М6.**
- 5. закрепите ложе на раме, используя шурупы 4.2х13.**

